

Spray 50 ml

Spis treści:

1. Co to jest **StickOff®** i w jakim celu się go stosuje?
2. Skład
3. Ważne informacje przed zastosowaniem
4. Jak stosować **StickOff®**
5. Możliwe działania niepożądane
6. Jak przechowywać **StickOff®** / ostrzeżenia
7. Pozostałe informacje

1. Co to jest **StickOff®** i w jakim celu się go stosuje?

Wyrób medyczny **StickOff®** to skuteczny spray do bezbolesnego usuwania wszelkiego rodzaju plastrów, opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących, m.in.:

- włókninowych,
- wodoodpornych,
- kinesiotapingowych,
- nikotynowych,
- hormonalnych.

StickOff®:

- całkowicie usuwa klej ze skóry,
- nie zawiera alkoholu,
- nie wysusza i nie podrażnia skóry.

StickOff®:

- szybko wysycha,
- pozostawia skórę gotową na zastosowanie kolejnego opatrunku.

StickOff®:

- jest łatwy w użyciu,
- aplikacja możliwa pod dowolnym kątem,
- doskonały do stosowania w trudno dostępnych miejscach.

2. Skład

Heksametylodisiloksan.

3. Ważne informacje przed zastosowaniem

Przeciwwskazania

Wyrobu **StickOff®** nie należy stosować, jeżeli:

- opakowanie jest uszkodzone,
- po upływie daty ważności,
- w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na składnik wyrobu.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu, skórę spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Stosować w pomieszczeniach wentylowanych, nie wdychać rozpylonego wyrobu. Nie stosować bezpośrednio na oczy. W przypadku dostania się wyrobu medycznego **StickOff®** do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeśli objawy podrażnienia utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.


Nie połykać wyrobu medycznego **StickOff®**. Przy połyknięciu NIE wywoływać wymiotów. Dokładnie wypłukać wodą usta. W przypadku pojawienia się objawów zatrucia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Jak stosować **StickOff®**

W celu osiągnięcia najlepszego wyniku, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Opatrunki na włókninie


1. Nanieść preparat na przyklejony plaster lub przylepiec i odczekać kilka sekund, aż powierzchnia plastra będzie wilgotna.
2. Delikatnie usunąć opatrunek. W zależności od potrzeb, w przypadku mocno przyklejonego plastra powtórzyć aplikację.

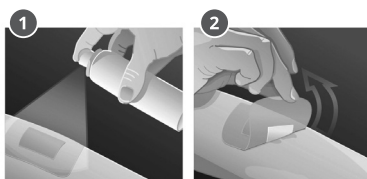

Nazwa handlowa produktu	StickOff
Nr projektu/kod	StickOff_01.2021A_PL_IFU
Wymiary siatki	120x300 mm
Kolory farb drukarskich	Black
Surowiec	offset 60 g/m ²
Data projektu	29-10-2020


Plastry wodoodporne, kinesiotaping, plastry nikotynowe, hormonalne, rozgrzewające i inne

1. Odkleić róg plastra i nanieść preparat między plaster a skórę.
2. Następnie delikatnie odklejać plaster, aplikując jednocześnie preparat.

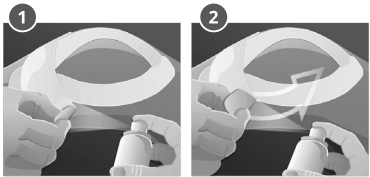

U noworodków lub w okolicach oczu

1. Nanieść niewielką ilość wyrobu do nasadki zabezpieczającej.
2. Zamoczyć patyczek higieniczny w preparacie i nanieść go na opatrunek (włókninowy) lub pod niego (wodoodporny). Odczekać kilka sekund i delikatnie usunąć opatrunek.

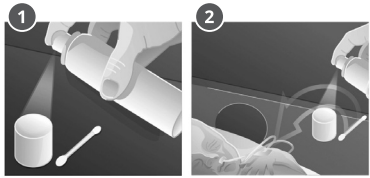

Preparat wysycha bardzo szybko, nie utrudniając przyklejenia kolejnego plastra/przylepca. Może być stosowany również do usuwania ze skóry starych pozostałości kleju. Wyrób medyczny **StickOff®** stosować tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją używania. Stosować w miarę potrzeb. **Aplikacja wyrobu medycznego u dzieci powinna odbywać się pod nadzorem osób dorosłych.**

5. Możliwe działania niepożądane

Wyrób medyczny **StickOff®** jest dobrze tolerowany i nie są znane żadne działania niepożądane po jego zastosowaniu. W razie wystąpienia objawów alergii lub innych działań niepożądanych należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

6. Jak przechowywać StickOff® / ostrzeżenia

Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
- Unikać uwolnienia do środowiska - po zużyciu zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Chronić przed dziećmi.

Data ważności i nr serii znajdują się na spodzie opakowania i na kartoniku.

7. Pozostałe informacje

StickOff® to wyrób medyczny I klasy.

Opakowanie: Pojemnik wielodawkowy o objętości 50 ml netto, zawierający 160 pojedynczych dawek. Pojemnik jest pod ciśnieniem.

Wytwórca: EmergoPharm Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Józefa Piłsudskiego 11, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Dystrybutor w Polsce: Chiesi Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
tel.: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79
e-mail: info-pl@chiesi.com

Wyjaśnienie zastosowanych symboli

 Znak zgodności CE

 Wytwórca

 Numer serii

 Użyć przed końcem

 Opakowanie aerozolowe
- produkt spełnia wszelkie polskie i europejskie wymagania

 Materiały z włókien celulozy, zdolne do recyklingu i biodegradowalne
- inny papier, mieszany, tektura

 Wykonano z aluminium

 Skrajnie łatwopalny aerozol

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 01.2021

01.2021A_PL_IFU

Nazwa handlowa produktu	StickOff
Nr projektu/kod	StickOff_01.2021A_PL_IFU
Wymiary siatki	120x300 mm
Kolory farb drukarskich	Black
Surowiec	offset 60 g/m ²
Data projektu	29-10-2020